



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

DISPOSICIÓN Nº 7889

BUENOS AIRES, 19 NOV 2014

VISTO el Expediente Nº 1-47-4697-14-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones GRIMBERG DENTALES S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 1886/14.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. S. T.*

DISPOSICIÓN Nº 7889

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MÉDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca MANI, nombre descriptivo INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA y nombre técnico INSTRUMENTOS MANUALES DENTALES, PARA ENDODONCIA, de acuerdo a lo solicitado por GRIMBERG DENTALES S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 76 y 6 a 9 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-510-25, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º - La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas de la Dirección Nacional de Productos Médicos notifíquese al interesado, haciéndole



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **7889**

entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-4697-14-4

DISPOSICIÓN Nº

gs

7889

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº**7889**....

Nombre descriptivo: INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-662 - INSTRUMENTOS MANUALES DENTALES, PARA ENDODONCIA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MANI.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Instrumental de uso dental empleado durante los procedimientos endodónticos, manualmente o a través de su conexión a una pieza de mano.

Modelo/s: MANI REAMERS/ MANI ESCARIADORES.

MANI K-FILES/ MANI LIMAS K.

MANI H-FILES/ MANI LIMAS H.

MANI FLARE FILES/ MANI LIMAS FLARE.

MANI RT FILES/ MANI LIMAS RT.

MANI D FINDERS/ MANI D LOCALIZADOR.

MANI SPREADERS/ MANI ESPACIADOR.

MANI PLUGGERS/ MANI OBTURADOR.

MANI SHORT BARBED BROACHES/ MANI LIMAS CORTAS CON LENGÜETA.

MANI ALUNDUM POINTS/ MANI PUNTAS ALUNDUM.

MANI SILICONE POINTS/ MANI PUNTAS DE SILICONA.

MANI BARBED BROACHES/ MANI FRESA CON LENGÜETA.

MANI SQUARE BROACHES/ MANI FRESA CUADRADA.

MANI PEESO REAMERS/ MANI ESCARIADOR PEESO.

MANI GATES DRILLS/ MANI ESCARIADOR GATE.

MANI PASTE CARRIERS/ MANI PORTA PASTA (LENTULO).

MANI ENGINE REAMERS/ MANI ESCARIADOR P/ MOTOR.

MANI SUPER FILES/ MANI SUPER LIMAS.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

MANI ENGINE H-FILES/ MANI LIMAS H P/ MOTOR.

MANI U-FILES/ MANI LIMAS U.

MANI NRT FILES/ MANI LIMAS NRT.

MANI FLARE FILES NITi/ MANI FLARE LIMAS NITi.

MANI H-FILES NITi/ MANI LIMAS NITi H.

MANI SPREADERS NITi/ MANI ESPACIADORES NITi.

MANI PLUGGERS NITi/ MANI OBTURADOR NITi.

Periodo de vida útil: 10 Años, a partir de su fecha de elaboración.

Formas de presentación: Blisters o cajas conteniendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 unidades.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) MANI INC. PLANTA DE TAKANEZAWA.

2) MANI INC. PLANTA DE KIYOHARA.

3) MANI, HANOI CO., LTD. PLANTA DE PHO YEN.

Lugar/es de elaboración: 1) 743-Banchi, Nakaakutsu, Takanezawa-machi, Shioya-gun, Tochigi-ken, 329-1234, Japón.


2) 8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken 321-3231, Japón.

3) Tan Houong Commune. Pho Yen District, ThaiNguyen Province, Vietnam.

Expediente Nº 1-47-4697-14-4

DISPOSICIÓN Nº

7 8 8 9


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº


.....7888.....

8


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

ANEXO III.B INSTRUCCIONES DE USO

7 8 9

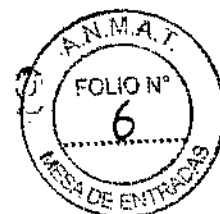

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 510- 25

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Producto no estéril

Origen del producto: Japón/ Vietnam (según corresponda)

Fabricante:

- MANI, INC. PLANTA DE TAKANEZAWA. 743-banchi, Nakaakutsu, Takanezawa-machi, Shioya-gun, Tochigi-ken, 329-1234, Japón.
- MANI, INC. PLANTA DE KIYOHARA. 8-3 Kiyohara Parque Industrial, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken, 321-3231, Japón.
- MANI, HANOI CO., LTD. PLANTA DE PHO YEN. Comuna de Tang Houong, Distrito de Pho Yen, Provincia de ThaiNguyen, Vietnam.

Importado y distribuido por: GRIMBERG DENTALES S.A. Lerma 426, CABA, Código Postal: C1414AZJ, Tel: 4777-2022 Argentina.

Directora técnica: Farmacéutica L. Yanina Cardozo- M.N. 14444

DESCRIPCION: Instrumental manual para endodoncia. Compuestos por un mango y una porción cortante.

Ejemplos:

ESCARIADORES

Length(L): 18,21,25,28,31mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 06 - 140
 Assorted: 15 - 40 Rubber Stopper
 45 - 80 21% 25%
 90 - 140 28% 31%

15mm Reamers: #15 - #40 Only
 Medium Reamers: #12,17,22,27,32,37 (21,25mm)

ESCARIADORES

Length(L): 18,21,25,28,31mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 06 - 140
 Assorted: 15 - 40 Rubber Stopper
 45 - 80 21% 25%
 90 - 140 28% 31%

15mm Reamers: #15 - #40 Only
 Medium Reamers: #12,17,22,27,32,37 (21,25mm)

ESCARIADORES

Length(L): 18,21,25,28,31mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 06 - 140
 Assorted: 15 - 40 Rubber Stopper
 45 - 80 21% 25%
 90 - 140 28% 31%

16mm H-Files: #15 - #40 Only
 Medium H-Files: #12,17,22,27,32,37 (21,25mm)

LOCALIZADORES D

Length(L): 21,25mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 08,10,12,14 Rubber Stopper
 21% 25%

ESCARIADOR PARA MOTOR

Length(L): 18,21,25,28mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 10 - 80
 Assorted: 15 - 40

ESCARIADOR PARA MOTOR

Length(L): 18,21,25,28,31mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 15 - 80 Rubber Stopper
 Assorted: 15 - 40 21% 25%
 45 - 80 28% 31%

Side Ratio: #15 - #25, #27, #37 - #40 (1:1)

ESCARIADOR PARA MOTOR

Length(L): 21,25mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 15 - 60 Rubber Stopper
 Taper: 05 21% 25%
 Assorted: 15 - 40

NEW

Length(L): 21,25mm
 Packed: 6 in a package
 Size: 20,30,40 Rubber Stopper
 Taper: 14,12,10,08,06,04 21% 25%
 Assorted: 20,25,30,37 or 40 1:1 Taper

INDICACIONES DE USO:

Instrumental de uso dental empleado durante los procedimientos endodónticos, manualmente o a través de su conexión a una pieza de mano.

Dado que presentan diversas medidas y formas, es necesario seleccionar el instrumental más adecuado en cada caso.

Indicaciones particulares:

MANI REAMERS/ MANI ESCARIADORES
MANI K-FILES/ MANI LIMAS K
MANI H-FILES/ MANI LIMAS H
MANI FLARE FILES/ MANI LIMAS FLARE
MANI RT FILES/ MANI LIMAS RT
MANI D FINDERS/ MANI D LOCALIZADOR
MANI FLARE FILES NiTi/ MANI FLARE LIMAS NiTi
MANI H-FILES NiTi/ MANI LIMAS NiTi H

indicados para ensanchar y/o desbridar el canal radicular.

MANI SPREADERS/ MANI ESPACIADOR:
MANI PLUGGERS/ MANI OBTURADOR:
MANI SPREADERS NiTi/ MANI ESPACIADORES NiTi
MANI PLUGGERS NiTi/ MANI OBTURADOR NiTi

Indicados para colocar en el canal radicular con material de relleno.

MANI SHORT BARBED BROACHES/ MANI LIMAS CORTAS CON LENGÜETA
MANI BARBED BROACHES/ MANI FRESA CON LENGÜETA
Indicadas para generar un orificio, ensanchar el canal radicular y extirpar la pulpa.

MANI ALUNDUM POINTS/ MANI PUNTAS ALUNDUM
MANI SILICONE POINTS/ MANI PUNTAS DE SILICONA
MANI SUPER FILES/ MANI SUPER LIMAS
MANI ENGINE H-FILES/ MANI LIMAS H P/ MOTOR
MANI U-FILES/ MANI LIMAS U
MANI NRT FILES/ MANI LIMAS NRT

Indicados para moler y pulir por rotación al ser conectados a una pieza de mano.

MANI SQUARE BROACHES/ MANI FRESA CUADRADA
Indicadas para encontrar el canal radicular

MANI PEESO REAMERS/ MANI ESCARIADOR PEESO
MANI GATES DRILLS/ MANI ESCARIADOR GATE

Indicados para acceder y agrandar el canal radicular al ser conectados a una pieza de mano.

MANI PASTE CARRIERS/ MANI PORTA PASTA (LENTULO)
Indicados para introducir material de relleno o medicación en el canal radicular al ser conectados a una pieza de mano.

MANI ENGINE REAMERS/ MANI ESCARIADOR P/ MOTOR
Indicados para limpiar y agrandar el canal radicular al ser conectados a una pieza de mano.


7890



GRUPO DENTALES S.A.
Carm. Lilitana Yanina Cardozo
Inscrita técnica - Apoderada legal
MN n° 14444

MODO DE USO:

- Solo debe ser usado por profesionales dentales capacitados aplicando los métodos estandares adquiridos durante su formación académica.
- Debe asegurarse la esterilización antes de cada uso
- Solo use estos productos para tratamientos dentales, de acuerdo a su indicación de uso.

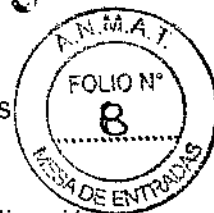**CONTRAINDICACIONES**

No use estos productos en pacientes que observe reacciones de sensibilidad o alergia

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Lea atentamente las precauciones



Producto no estéril

Para uso dental exclusivo

- Para prevenir infecciones, esterilice estos productos en autoclave y asegúrese que el proceso se haya completado, antes de cada uso
- Elija el tipo más apropiado de instrumento en cada caso y siga el método de uso general.
- Antes del uso, compruebe el estado del instrumento fuera de la cavidad oral, que no posea deformaciones, rayaduras o rajaduras
- Si la cabeza de la pieza es delgada, larga o grande podría quebrarse o torcerse. Evite aplicar excesiva presión o ángulos extremos
- Utilice protección ocular para proteger los ojos de partículas expulsadas. También use mascarilla para polvo para prevenir inhalaciones.
- Coloque al paciente un dique de goma para prevenir las ingestión accidental
- Luego de ser usados los instrumentos deben ser inmediatamente lavados y descontaminados con algún agente de limpieza de uso médico, cepille para eliminar fluidos y tejidos orgánicos
- Si utiliza baño ultrasónico coloque los instrumentos en un soporte apropiado para evitar el deterioro del área de trabajo de las mismas.
- Manipule las piezas con cuidado ya que poseen partes filosas

MANTENIMIENTO, MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO:

Evite el almacenamiento a altas temperaturas, humedad elevada y luz solar directa.

Manténgalas alejadas de líquidos.

No lo almacene bajo lámpara germicida.

Almacene a temperatura ambiente.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

- Estos instrumentos pueden corroerse si son sumergidos durante largo tiempo en hipoclorito de sodio, edta, etc.
- Para baño ultrasónico coloque los instrumentos en un soporte apto para evitar el deterioro del área de trabajo.



- Si esta reusando los instrumentos, lave y asegurese de eliminar completamente sustancias extrañas. Luego esterilice.
- Utilice desinfectantes y detergentes siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante.
- Descarte los instrumentos deteriorados o dañados
- Para esterilizar, coloque los instrumentos en pouches o en un contenedor apropiado y autoclave:
 1. Temperatura: 121°C Tiempo: 20 minutos o mas
 2. Temperatura: 126°C Tiempo: 15 minutos o mas
- No use métodos de esterilización cuya temperatura supere los 200°C, ya sea vapor o calor seco

NOTA:

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la esterilización sea eficaz.

PERIODO DE VIDA UTIL:


10 AÑOS, a partir de su fecha de elaboración.

En uso, el periodo de vida útil dependerá de la frecuencia de uso, la manipulación y el mantenimiento.

Descarte aquellos instrumentos deteriorados o que han disminuido su performance como cualquier otro instrumental médico, respetando la legislación local vigente.

CONDICION DE EXPENDIO:

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


 GRIMBERG DENTALES S.A
 Firm: Liliana Yanina Cardozo
 Directora técnica - Apoderada legal
 MN n° 14444

7 8 8 9



LERMA 426
Buenos Aires - C.P. C1414AZJ
ARGENTINA
Tel. / Fax: (5411) 4777-2022
Fax: (5411) 4773-2318
dtotecnico@grimbergdentales.com

PROYECTO DE RÓTULO

MARCA: MANI

Nombre del producto: (según corresponda)

MANI REAMERS/	MANI ESCARIADORES
MANI K-FILES/	MANI LIMAS K
MANI H-FILES/	MANI LIMAS H
MANI FLARE FILES/	MANI LIMAS FLARE
MANI RT FILES/	MANI LIMAS RT
MANI D FINDERS/	MANI D LOCALIZADOR
MANI SPREADERS/	MANI ESPACIADOR
MANI PLUGGERS/	MANI OBTURADOR
MANI SHORT BARBED BROACHES/	MANI LIMAS CORTAS CON LENGUETA
MANI ALUNDUM POINTS/	MANI PUNTAS ALUNDUM
MANI SILICONE POINTS/	MANI PUNTAS DE SILICONA
MANI BARBED BROACHES/	MANI FRESA CON LENGUETA
MANI SQUARE BROACHES/	MANI FRESA CUADRADA
MANI PEESO REAMERS/	MANI ESCARIADOR PEESO
MANI GATES DRILLS/	MANI ESCARIADOR GATE
MANI PASTE CARRIERS/	MANI PORTA PASTA (LENTULO)
MANI ENGINE REAMERS/	MANI ESCARIADOR P/ MOTOR
MANI SUPER FILES/	MANI SUPER LIMAS
MANI ENGINE H-FILES/	MANI LIMAS H P/ MOTOR
MANI U-FILES/	MANI LIMAS U
MANI NRT FILES/	MANI LIMAS NRT
MANI FLARE FILES NITI/	MANI FLARE LIMAS NITI
MANI H-FILES NITI/	MANI LIMAS NITI H
MANI SPREADERS NITI/	MANI ESPACIADORES NITI
MANI PLUGGERS NITI/	MANI OBTURADOR NITI

Instrumental para endodoncia

Número de Serie: ver envase
Lea las Instrucciones antes de usar

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 510- 25
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Producto No Estéril

Origen del producto: Japón/ Vietnam (según corresponda)

Fabricante:

- MANI, INC. PLANTA DE TAKANEZAWA. 743-banchi, Nakaakutsu, Takanezawa-machi, Shioya-gun, Tochigi-ken, 329-1234, Japón.
- MANI, INC. PLANTA DE KIYOHARA. 8-3 Kiyohara Parque Industrial, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken, 321-3231, Japón.
- MANI, HANOI CO., LTD. PLANTA DE PHO YEN. Comuna de Tang Houong, Distrito de Pho Yen, Provincia de ThaiNguyen, Vietnam.

Importado y distribuido por: GRIMBERG DENTALES S.A. Lerma 426, CABA, Argentina Código Postal: C1414AZJ, Tel: 4777-2022

Directora Técnica: Farmacéutica L. Yanina Cardozo – M.N.14.444

GRIMBERG DENTALES S.A.
Farm. Yanina Cardozo
Directora Técnica - Apoderada legal
M.N. 14444



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-4697-14-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° ...**7...8...8...9** y de acuerdo a lo solicitado por GRIMBERG DENTALES S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-662 - INSTRUMENTOS MANUALES DENTALES, PARA ENDODONCIA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MANI.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Instrumental de uso dental empleado durante los procedimientos endodónticos, manualmente o a través de su conexión a una pieza de mano.

Modelo/s: MANI REAMERS/ MANI ESCARIADORES.

MANI K-FILES/ MANI LIMAS K.

MANI H-FILES/ MANI LIMAS H.

MANI FLARE FILES/ MANI LIMAS FLARE.

MANI RT FILES/ MANI LIMAS RT.

MANI D FINDERS/ MANI D LOCALIZADOR.

MANI SPREADERS/ MANI ESPACIADOR.

MANI PLUGGERS/ MANI OBTURADOR.

MANI SHORT BARBED BROACHES/ MANI LIMAS CORTAS CON LENGÜETA.

MANI ALUNDUM POINTS/ MANI PUNTAS ALUNDUM.

MANI SILICONE POINTS/ MANI PUNTAS DE SILICONA.

MANI BARBED BROACHES/ MANI FRESA CON LENGÜETA.

MANI SQUARE BROACHES/ MANI FRESA CUADRADA.

..//

MANI PEESO REAMERS/ MANI ESCARIADOR PEESO.

MANI GATES DRILLS/ MANI ESCARIADOR GATE.

MANI PASTE CARRIERS/ MANI PORTA PASTA (LENTULO).

MANI ENGINE REAMERS/ MANI ESCARIADOR P/ MOTOR.

MANI SUPER FILES/ MANI SUPER LIMAS.

MANI ENGINE H-FILES/ MANI LIMAS H P/ MOTOR.

MANI U-FILES/ MANI LIMAS U.

MANI NRT FILES/ MANI LIMAS NRT.

MANI FLARE FILES NITi/ MANI FLARE LIMAS NITi.

MANI H-FILES NITi/ MANI LIMAS NITi H.

MANI SPREADERS NITi/ MANI ESPACIADORES NITi.

MANI PLUGGERS NITi/ MANI OBTURADOR NITi.

Periodo de vida útil: 10 Años, a partir de su fecha de elaboración.

Formas de presentación: Blisters o cajas conteniendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 unidades.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) MANI INC. PLANTA DE TAKANEZAWA.

2) MANI INC. PLANTA DE KIYOHARA.

3) MANI, HANOI CO., LTD. PLANTA DE PHO YEN.

Lugar/es de elaboración: 1) 743-Banchi, Nakaakutsu, Takanezawa-machi, Shioya-gun, Tochigi-ken, 329-1234, Japón.

2) 8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken 321-3231, Japón.

3) Tan Houong Commune. Pho Yen District, ThaiNguyen Province, Vietnam.

Se extiende a GRIMBERG DENTALES S.A. el Certificado PM-510-25, en la Ciudad de Buenos Aires, a 19 NOV 2014, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

7 8 8 9


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.