



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 21131

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

BUENOS AIRES, 05 MAY 2010

VISTO el Expediente N° 1-47-11.324-09-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones NOBEL BIOCARE USA LLC SUCURSAL ARGENTINA solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **2113**

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca ALPHA BIO Tec, nombre descriptivo COMPONENTES PROTÉSICOS Y ACCESORIOS, y nombre técnico PRÓTESIS, DENTALES, IMPLANTABLES, de acuerdo a lo solicitado, por NOBEL BIOCARE USA LLC SUCURSAL ARGENTINA, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 346, y 83 a 86 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-886-21, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 2113

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-11.324-09-4

DISPOSICIÓN N°

✓

2113

DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



**Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.**

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° ...**2113**...

Nombre descriptivo: COMPONENTES PROTÉSICOS Y ACCESORIOS.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-744 - Prótesis, Dentales,
Implantables.

Marca de (los) producto(s) médico(s): ALPHA BIO Tec.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Los componentes protésicos y accesorios ALPHA BIO
Tec están indicados para sustituciones dentales que se colocan sobre implantes
para reponer piezas dentales faltantes.

Modelo/s: TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL CORTO

TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL PARA ARRC

ADAPTADOR PARA PILAR ZIRCONIO

ANALOGO CONICO

ANALOGO IMPLANTE ARROW

ANALOGO IMPLANTE PARA ARRC IAC

ANALOGO IMPLANTE: MEDIDAS VARIAS

ANALOGO RECTO

BOLILLA TITANIO: MEDIDAS VARIAS

COFIA PILAR TITANIO

COMPONENTE PLASTICO PARA HBZ

COMPONENTE PLASTICO PARA TLA 1-4

CONEXIÓN BASE HEXAGONAL: MEDIDAS VARIAS

CONEXIÓN TITANIO: MEDIDAS VARIAS

CUBIERTA CICATRIZACION PARA TCT

CUBIERTA IMPLANTE CSTC

CUBIERTA METAL PARA IMPLANTE ARROW



**Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.**

2113

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

CUBIERTA METAL PARA MICRO SIZE
CUBIERTA METAL PARA NC1/2.25
GUIA & POSICIONADOR ARROW
LAMINA PLASTICA CONICA
LAMINA PLASTICA CONICA ROTACIONAL
LAMINA PLASTICA NO ROTACIONAL
LAMINA PLASTICA RECTA
LAMINA TITANIO CONICA ROTACIONAL
LAMINA TITANIO RECTA
PILA BOLILLA ANGULADO
PILAR ESTHETIC LOCK TITANIO LARGO
PILAR ESTHETIC LOCK TITANIO MEDIDAS VARIAS
PILAR ESTHETIC TITANIO: MEDIDAS VARIAS
PILAR LOCK PLASTICO CON BASE METALICA
PILAR LOCK PLASTICO DELGADO
PILAR LOCK PLASTICO NORMAL
PILAR LOCK PLASTICO ROTACIONAL
PILAR LOCK TITANIO ANCHO
PILAR LOCK TITANIO COMPUESTO
PILAR LOCK TITANIO CON BASE METALICA
PILAR LOCK TITANIO CON ESCALLOP ANGULADO
PILAR LOCK TITANIO CON HOMBRO: MEDIDAS VARIAS
PILAR LOCK TITANIO LARGO/ CORTO/DELGADO
PILAR LOCK TITANIO PARA IMPLANTE 5, 6MM
PILAR LOCK TITANIO: MEDIDAS VARIAS
PILAR OMNI
PILAR PLASTICO PARA ARRC
PILAR RECTO TITANIO: MEDIDAS VARIAS
PILAR TITANIO ANGULADO PARA ARPB
PILAR TITANIO ANGULADO PARA ARRC
PILAR TITANIO PARA ARPB



**Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.**

21131

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

PILAR TITANIO PARA ARRC
PILAR TITANIO PARA ARRP
PILAR TITANIO PARA IMPLANTE
PILAR ZIRCONIO PARA HBZ
PIN GUIA LARGO
TAPA NYLON ARROW
TAPA NYLON CON PARTES INTERNAS DE TITANIO
TAPA NYLON PARA ARPB
TAPA NYLON PARA CUBIERTA METAL: MEDIDAS VARIAS
TAPA PLASTICA ARROW ROTACIONAL/ NO ROTACIONAL
TAPA TELESCOPICA ARROW PARA CEMENTACION
TORNILLO BOLILLA PARA TSA & TCT
TORNILLO BOLILLA PARA ARRC: MEDIDAS VARIAS
TORNILLO FIJACION
TORNILLO FIJACION LARGO/CORTO
TORNILLO FIJACION TORQFIT
TORNILLO LARGO MEDIDAS VARIAS
TORNILLO PARA HBZ
TORNILLO PARA TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL
TORNILLO PARA TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL CORTO
TORNILLO PILAR
TORNILLO PILAR CORTO/ LARGO
TORNILLO PILAR PARA ARRC
TORNILLO PROTESICO PARA TRANSFERENCIA CORTO
TORNILLO RESCATE
TORNILLO TITANIO TORQFIT
TORNILLO TRANSFERENCIA CONICO
TORNILLO TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Alpha-Bio Tec Ltd.



**Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.**

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

Lugar/es de elaboración: 7 Imbar St. Kiryat Arye, Petach-Tikva P.O.B 3936 ZIP
49511, Israel.

Expediente N° 1-47-11.324-09-4

DISPOSICIÓN N°

2113

**DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.**



**Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.**

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ANEXO II

**TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**

.....21131


**DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.**


2 1 3

PROYECTO DE ROTULOS SEGÚN DISP. ANMAT Nº 2318, ANEXO IIB 346

PROYECTO ROTULO FABRICANTE

AlphaBio™

REF 5050 HLT
HEX LOCK ASUT, TRANSFER

CE _{R_{only}} **NON STERILE** 

00000

LOT

Manufactured by: Alpha-Bio Tec LTD, P.O.B. 3936
Petach Tikva 49511 Israel. www.alpha-bio.net

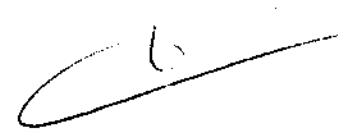
SCIREP MEDES LIMITED, 3 Besmont Gate, Radlett,
Herts, WD7 7AR, England. Tel/Fax: +44 1923899810

PROYECTO STICKER IMPORTADOR

Importador: **Nobel Biocare** USA LLC,
 Sucursal argentina: Av. Santa Fe 2844-Capital Federal
 Directora Técnica: Marisa Mercado-Farmacéutica
 Fabricado por: Alpha- Bio Tec Ltd.
 POB 3936 ZIP 49511.Petaca-Tikva.Israel.
 PILAR Autorizado por la ANMAT

PM-886-21

Lote Nº: XXXX
 Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias




MARISA MERCADO
FARMACEUTICA
 M.N. 11892



13 1 13

Instrucciones de uso del sistema de implantes Alpha-Bio Tec

1. Descripción del producto

El sistema de implantes Alpha-Bio Tec incluye distintos tipos y tamaños de implantes dentales fabricados en titanio grado 5 y sometidos a un tratamiento superficial exclusivo. Al final del proceso, los implantes se esterilizan con radiación gamma. La implantación se realiza mediante una cirugía que incluye abrir un colgajo, perforar e insertar el implante en el maxilar.

2. Propósito del producto

Los implantes Alpha-Bio Tec se usan para rehabilitar pacientes completa o parcialmente edentados. La rehabilitación con implantes incluye diversas opciones: corona simple, varias coronas conectadas y dentaduras postizas parciales o completas que se conectan a los implantes Alpha-Bio Tec mediante muñones de conexión.

Indicaciones para implantes de 3 y 3,3 mm

Estos implantes tienen una resistencia mecánica inferior a la de los implantes de 3,75 y 4,2 mm y similares. Las indicaciones para este implante son a mínima carga únicamente. Este implante no se debe usar como muñón de conexión simple de una corona en áreas distales.

Se recomienda los implantes Arrow Press para colocación con una fuerza inferior a 60 Ncm.


3. Indicaciones

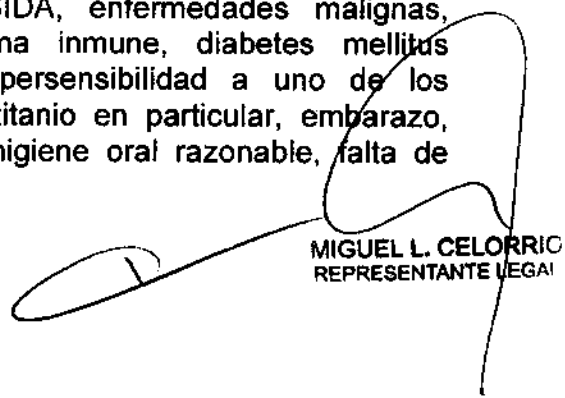
Una condición esencial es que la cantidad y calidad del hueso sean adecuadas para realizar los implantes. Estos datos se obtienen durante la fase de planificación mediante radiografías apropiadas (panorámicas y tomografía computada) del lugar de implantación. Se deben identificar las áreas cercanas al lugar de implantación, tales como vasos sanguíneos, nervios, senos maxilares y cavidad nasal, a fin de evitar dañarlas.

La realización de procedimientos quirúrgicos está sujeta a la condición sistémica del paciente.

4. Contraindicaciones

Pacientes que toman medicamentos basados en esteroides, anticonvulsivantes y anticoagulantes. Pacientes que reciben radioterapia, quimioterapia u otros tratamientos inmunosupresores o a los que se ha administrado radioterapia en los últimos 5 años. Trastornos óseos metabólicos, trastornos hemorrágicos no controlados, tales como hemofilia, trombocitopenia y granulocitopenia. Enfermedades degenerativas, osteoradionecrosis, insuficiencia renal, receptores de trasplantes de órganos, SIDA, enfermedades malignas, enfermedades que comprometen el sistema inmune, diabetes mellitus desequilibrada, enfermedades psíquicas, hipersensibilidad a uno de los componentes del implante en general y al titanio en particular, embarazo, incapacidad del paciente de mantener una higiene oral razonable, falta de


MARISA ZULMA MERCADO
FARMACEUTICA
M.N. 11882


MIGUEL L. CELORRIO
REPRESENTANTE LEGAL

cooperación del paciente, consumo de alcohol y narcóticos y enfermedades endocrinológicas no controladas.

Cualquier condición sistémica que esté desequilibrada y por lo tanto impida los procedimientos quirúrgicos.

Falta de experiencia o capacitación apropiada del dentista a cargo.

5. Contraindicaciones relativas

Huesos previamente irradiados, tratamiento con medicamentos anticoagulantes o bisfosfonatos, bruxismo, hábitos parafuncionales, enfermedad periodóntica no tratada y/o no controlada, enfermedad de la articulación temporomandibular y diversas patológicas de la mucosa oral.

6. Instrucciones para después de realizar implantes Alpha-Bio Tec

Evitar las acciones que sometan al cuerpo a tensiones físicas después de la implantación, comer sólo alimentos fríos y blandos y tomar antibióticos, enjuagues orales y analgésicos según las instrucciones del dentista actuante. No escupir ni lavarse los dientes el día de la implantación. Es aconsejable ponerse un paquete de hielo intermitentemente en el área externa de la implantación el día de la operación.

7. Efectos postoperatorios adversos a corto plazo

Dolor, hinchazón, infección, sangrado y hemorragias.

8. Complicaciones y riesgos a corto plazo

Daños nerviosos causados por la pérdida temporal o permanente de la sensibilidad del labio inferior y/o la lengua, daños a los vasos sanguíneos (puede causar sangrado que ponga en peligro la vida), perforación de la cavidad nasal y/o senos maxilares e infección local y sistémica.

9. Complicaciones y riesgos a largo plazo

Dolor crónico, falta de sensibilidad en el labio o la lengua, infección local o sistémica, perforación de los senos, ruptura de la cavidad nasal, daños a los dientes adyacentes, fractura del implante, fractura de la restauración, fractura ósea, trastornos estéticos y endocarditis infecciosa.

10. Advertencias

Un error en la evaluación del paciente, en el diagnóstico previo al tratamiento y en el plan de tratamiento, resultante de la inexperiencia o falta de capacitación apropiada del dentista tratante puede poner en peligro la salud del paciente y causarle daños severos, irreversibles e incluso peligro de muerte.

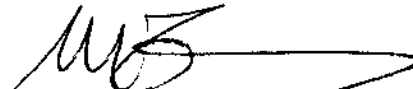
Por tal razón, la implantación no debe realizarse si el dentista que la lleva a cabo no está apropiadamente capacitado en un instituto reconocido.

El implante está diseñado para ser usado una sola vez. No se debe esterilizar

El implante es estéril salvo que abra y dañe su envase.

La realización de implantaciones puede requerir antibióticos profilácticos.

Los dispositivos Alpha-Bio Tec están previstos para profesionales únicamente.


MARISA ZULMA MERCADO
FARMACEUTICA
M.N. 11892


MIGUEL L. CELORRIC
REPRESENTANTE UEGA

2113



	Esterilizado con irradiación gamma
	No reutilizar
	Precaución: Consultar los documentos adjuntos
	Fecha de vencimiento
	Lote N°
	Marca de CE
	Para ser usado por profesionales únicamente

Fabricado por:
Alpha-Bio Tec Ltd
7, Imbar st. Kiryat Arye
P.O.B 3936 ZIP 49130
Petach-Tikva, Israel.

Importador: Nobel Biocare USA LLC,
Sucursal Argentina. Av. Santa Fé 2844.2°Piso.
Capital Federal.
Directora Técnica: Marisa Mercado
Autorizado por ANMAT PM-886-20

MARISA ZULMA MERCADO
FARMACEUTICA
M.N. 11862

MIGUEL L. CELORRIO
REPRESENTANTE LEGAL



**Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.**

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-11.324-09-4

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **2113** y de acuerdo a lo solicitado por NOBEL BIOCARE USA LLC SUCURSAL ARGENTINA, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: **COMPONENTES PROTÉSICOS Y ACCESORIOS.**

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: **16-744 - Prótesis, Dentales, Implantables.**

Marca de (los) producto(s) médico(s): **ALPHA BIO Tec.**

Clase de Riesgo: **Clase II.**

Indicación/es autorizada/s: **Los componentes protésicos y accesorios ALPHA BIO Tec están indicados para sustituciones dentales que se colocan sobre implantes para reponer piezas dentales faltantes.**

Modelo/s: **TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL CORTO
TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL PARA ARRC
ADAPTADOR PARA PILAR ZIRCONIO
ANALOGO CONICO**

ANALOGO IMPLANTE ARROW

ANALOGO IMPLANTE PARA ARRC IAC

ANALOGO IMPLANTE: MEDIDAS VARIAS

ANALOGO RECTO

BOLILLA TITANIO: MEDIDAS VARIAS

COFIA PILAR TITANIO

COMPONENTE PLASTICO PARA HBZ

COMPONENTE PLASTICO PARA TLA 1-4

CONEXIÓN BASE HEXAGONAL: MEDIDAS VARIAS

CONEXIÓN TITANIO: MEDIDAS VARIAS

CUBIERTA CICATRIZACION PARA TCT
CUBIERTA IMPLANTE CSTC
CUBIERTA METAL PARA IMPLANTE ARROW
CUBIERTA METAL PARA MICRO SIZE
CUBIERTA METAL PARA NC1/2.25
GUIA & POSICIONADOR ARROW
LAMINA PLASTICA CONICA
LAMINA PLASTICA CONICA ROTACIONAL
LAMINA PLASTICA NO ROTACIONAL
LAMINA PLASTICA RECTA
LAMINA TITANIO CONICA ROTACIONAL
LAMINA TITANIO RECTA
PILA BOLILLA ANGULADO
PILAR ESTHETIC LOCK TITANIO LARGO
PILAR ESTHETIC LOCK TITANIO MEDIDAS VARIAS
PILAR ESTHETIC TITANIO: MEDIDAS VARIAS
PILAR LOCK PLASTICO CON BASE METALICA
PILAR LOCK PLASTICO DELGADO
PILAR LOCK PLASTICO NORMAL
PILAR LOCK PLASTICO ROTACIONAL
PILAR LOCK TITANIO ANCHO
PILAR LOCK TITANIO COMPUESTO
PILAR LOCK TITANIO CON BASE METALICA
PILAR LOCK TITANIO CON ESCALLOP ANGULADO
PILAR LOCK TITANIO CON HOMBRO: MEDIDAS VARIAS
PILAR LOCK TITANIO LARGO/ CORTO/DELGADO
PILAR LOCK TITANIO PARA IMPLANTE 5, 6MM
PILAR LOCK TITANIO: MEDIDAS VARIAS
PILAR OMNI
PILAR PLASTICO PARA ARRC





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

PILAR RECTO TITANIO; MEDIDAS VARIAS
PILAR TITANIO ANGULADO PARA ARPB
PILAR TITANIO ANGULADO PARA ARRC
PILAR TITANIO PARA ARPB
PILAR TITANIO PARA ARRC
PILAR TITANIO PARA ARRP
PILAR TITANIO PARA IMPLANTE
PILAR ZIRCONIO PARA HBZ
PIN GUIA LARGO
TAPA NYLON ARROW
TAPA NYLON CON PARTES INTERNAS DE TITANIO
TAPA NYLON PARA ARPB
TAPA NYLON PARA CUBIERTA METAL: MEDIDAS VARIAS
TAPA PLASTICA ARROW ROTACIONAL/ NO ROTACIONAL
TAPA TELESCOPICA ARROW PARA CEMENTACION
TORNILLO BOLILLA PARA TSA & TCT
TORNILLO BOLILLA PARA ARRC: MEDIDAS VARIAS ,
TORNILLO FIJACION
TORNILLO FIJACION LARGO/CORTO
TORNILLO FIJACION TORQFIT
TORNILLO LARGO MEDIDAS VARIAS
TORNILLO PARA HBZ
TORNILLO PARA TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL
TORNILLO PARA TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL CORTO
TORNILLO PILAR
TORNILLO PILAR CORTO/ LARGO
TORNILLO PILAR PARA ARRC
TORNILLO PROTESICO PARA TRANSFERANCIA CORTO
TORNILLO RESCATE
TORNILLO TITANIO TORQFIT

TORNILLO TRANSFERENCIA CONICO

TORNILLO TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA PILAR LOCK HEXAGONAL

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Alpha-Bio Tec Ltd.

Lugar/es de elaboración: 7 Imbar St. Kiryat Arye, Petach-Tikva P.O.B 3936 ZIP 49511, Israel.

Se extiende a NOBEL BIOCARE USA LLC SUCURSAL ARGENTINA el Certificado PM-886-21, en la Ciudad de Buenos Aires, a 05 MAY 2010, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

C

2113


DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.